

ПАСПОРТ

Руководство по сборке и эксплуатации

Кресло для забора крови и терапевтических процедур ДР02

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-006-34960786-2021
Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/18521



Назначение и описание изделия

Кресло ДР02 для забора крови и терапевтических процедур предназначено для сидения во время проведения процедур, забора крови, внутривенных манипуляций и пр.

Область применения: оснащение медицинских, лечебных и лечебно-профилактических учреждений.

Кресло винтовое на четырехлучевой опоре (диаметром 500 мм) с регулируемыми опорами (глайдерами), компенсирующими неровности пола. Имеет специальное кольцо – подставку для ног диаметром 360 мм.

Кресло имеет два подлокотника, которые регулируются по высоте, по разлету, а также мягкая часть подлокотника вращается вокруг своей оси на 360 градусов.

Каркас сварной изготовлен из стальной трубы круглого и квадратного сечений, имеет защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Сиденье, спинка и подлокотники обиты поролоном и обтянуты экокожей. Дно сиденья и подлокотников обито спанбондом. Спинка имеет заглушку, обтянутую экокожей.


Размер сиденья: 390x390 мм. Размер спинки: 360x360 мм.
Размер подлокотника: 150x300 мм.
Высота сиденья регулируется от 410 до 530 мм. Высота кресла – от 810 до 930 мм.
Расстояние от верха сиденья до верха подлокотников регулируется от 150 до 330 мм.
Расстояние между подлокотниками 500 мм.
Вес изделия: 9 кг.
Упаковка – воздушно-пузырчатая пленка.
Габаритные размеры: 600x600x600 мм. Объем: 0,22 м³. Вес: 10 кг.

Комплектность поставки

1. Верхняя часть (сиденье со спинкой) с профилем для крепления подлокотников – 1 шт.
2. Нижняя часть (опора с кольцом для ног) – 1 шт.
3. Металлическая (изогнутая) часть подлокотника – 2 шт.
4. Мягкая часть подлокотника – 2 шт.
5. Крепеж – комплект.

Инструкция по сборке

1. Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
2. Свинтить верхнюю часть кресла с нижней частью.
3. Установить металлические части (две изогнутые детали) подлокотников в отверстия профиля справа и слева от сиденья.
4. Установить мягкие части подлокотников на металлические части. Зафиксировать части подлокотников, закрутив болты-барашки.

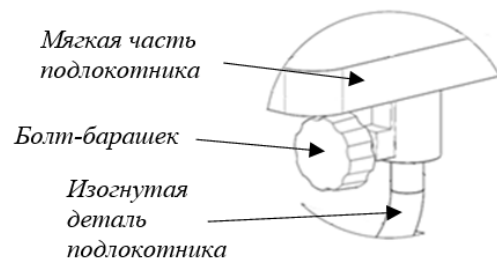

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за кожзаменителем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щётки с мягким ворсом.
 2. Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
 3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожзаменитель.
 4. Время от времени кожзаменитель следует протирать влажной тканью или губкой.
 5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
 6. Кожзаменитель не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на него солнечных лучей.
 7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожзаменитель светлых тонов.
- ВНИМАНИЕ! Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.
Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.