

ПАСПОРТ

Руководство по сборке и эксплуатации

Кресло медицинское для лечебных учреждений КР01

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-004-34960786-2019
Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14497

Назначение и описание изделия

Кресло КР01 на винтовой опоре предназначено для сидения.

Изготавливается в двух вариантах:

КР01 – со стандартным сиденьем,

КР01(Т) – с мягким сиденьем толщиной 50 мм.

Область применения – медицинские учреждения, производственные помещения, учебные помещения, лаборатории, лечебно-профилактические учреждения, социальные учреждения, офисы и другие помещения.

Кресло оснащено дополнительным кольцом жесткости под сиденьем. Четырехлучевое основание диаметром 530 мм (с колесными опорами 560 мм) на колесных опорах диаметром 50 мм. Основание имеет специальное кольцо – опору для ног диаметром 360 мм.

Каркас изготовлен из стальной трубы. Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Сиденье и спинка обиты поролоном и обтянуты экокожей.

Диаметр сиденья: 375 мм – КР01, 380 мм – КР01(Т).

Высота сиденья регулируется от 440 до 560 мм (КР01), от 470 до 590 мм (КР01(Т)).

Высота кресла – от 850 до 970 мм.

Упаковка – воздушно-пузырчатая пленка.

Габаритные размеры упаковки: 550x550x850 мм. Объем – 0,26 м³. Вес – 8 кг.

Комплектность поставки

Верхняя часть (сиденье – спинка с винтом) – 1 шт.

Нижняя часть (опора с кольцом для ног) – 1 шт.

Колесные опоры – 4 шт.

Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.

Инструкция по сборке

1. Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
2. Свинтить верхнюю часть кресла с нижней частью.
3. Установить колесные опоры в резьбовые отверстия нижней части кресла.

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за кожзаменителем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щётки с мягким ворсом.
2. Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожзаменитель.
4. Время от времени кожзаменитель следует протирать влажной тканью или губкой.
5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
6. Кожзаменитель не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на него солнечных лучей.
7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожзаменитель светлых тонов.

ВНИМАНИЕ! Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61

Тел.: +7 (812) 408-49-31

<https://inmedix.ru/>

E-mail: info@inmedix.ru