

## ПАСПОРТ

### Руководство по сборке и эксплуатации

#### Кресло медицинское для лечебных учреждений КР03/К

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-004-34960786-2019  
Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14497

##### Назначение и описание изделия

Кресло КР03/К на винтовой опоре предназначено для сидения.

Изготавливается в двух вариантах:

**КР03/К** – со стандартным сиденьем,

**КР03(Т)/К** – с мягким сиденьем толщиной 50 мм.

Область применения – медицинские учреждения, производственные помещения, учебные помещения, лаборатории, лечебно-профилактические учреждения, социальные учреждения, офисы и другие помещения.

Кресло оснащено дополнительным кольцом жесткости под сиденьем. Пятилучевое основание диаметром 590 мм на колесных опорах диаметром 50 мм. Основание имеет регулируемое по высоте усиленное кольцо – опору для ног диаметром 360 мм.

Каркас изготовлен из стальной трубы. Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Сиденье и спинка обиты поролоном и обтянуты экокожей.

Диаметр сиденья: 375 мм – КР03/К, 380 мм – КР03(Т)/К.

Высота сиденья регулируется от 560 до 680 мм (КР03/К), от 600 до 720 мм (КР03(Т)/К).

Высота кресла – от 1000 до 1120 мм.

Упаковка – воздушно-пузырчатая пленка.

Габаритные размеры упаковки: 600х600х900 мм. Объем – 0,33 м<sup>3</sup>. Вес – 10 кг.

##### Комплектность поставки

Верхняя часть (сиденье – спинка с винтом) – 1 шт.

Нижняя часть (пятилучевое основание) – 1 шт.

Кольцо – опора для ног с тремя фиксаторами – 1 шт.

Колесные опоры – 5 шт.

*Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.*

##### Инструкция по сборке

1. Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
2. Установить кольцо-опору для ног на нижнюю часть. Выставить необходимую высоту и зафиксировать, закрутив три фиксатора.
3. Свинтить верхнюю часть кресла с нижней частью.
4. Установить колесные опоры в резьбовые отверстия нижней части кресла.

##### Обратите внимание!

*Во избежание повреждения покрытия стойки каркаса на кольцо-опору для ног нельзя вставлять.*

*Опорное кольцо является подставкой для ног во время сидения (чтобы избежать затекания ног).*

*Для регулировки кольца-опоры по высоте необходимо открутить все три фиксатора, выставить нужную высоту и зафиксировать кольцо, закрутив фиксаторы.*



КР03/К

КР03(Т)/К

##### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

##### Уход за окрашенными поверхностями

1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

##### Уход за кожнозамениателем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щётки с мягким ворсом.
  2. Кожзамениатель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
  3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожнозамениатель.
  4. Время от времени кожнозамениатель следует протирать влажной тканью или губкой.
  5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
  6. Кожзамениатель не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на него солнечных лучей.
  7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожнозамениатель светлых тонов.
- ВНИМАНИЕ!** Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

##### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61

Тел.: +7 (812) 408-49-31

<https://inmedix.ru/>

E-mail: [info@inmedix.ru](mailto:info@inmedix.ru)