

## ПАСПОРТ

### Руководство по сборке и эксплуатации

#### Кресло медицинское для лечебных учреждений КР09

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-004-34960786-2019  
Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14497

#### Назначение и описание изделия

Кресло КР09 на винтовой опоре предназначено для сидения.

Область применения – медицинские учреждения, производственные помещения, учебные помещения, лаборатории, лечебно-профилактические учреждения, социальные учреждения, офисы и другие помещения.

Четырехлучевое основание диаметром 530 мм (с колесными опорами 560 мм) на колесных опорах диаметром 50 мм. Основание имеет специальное кольцо – опору для ног диаметром 360 мм.

Каркас изготовлен из стальной трубы, диаметр 25 мм. Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Высота сиденья регулируется от 450 до 570 мм. Высота кресла – от 850 до 970 мм.

Сиденье, спинка и подлокотники обиты поролоном и обтянуты экокожей.

Размер сиденья – 390x390 мм, толщина 50 мм. Размер спинки – 360x360 мм. Размер подлокотника 255x45 мм. Высота от верха сиденья до верха подлокотника – 210 мм. Расстояние между подлокотниками 495 мм. Каркас сиденья и спинки сделан из профиля 20\*20 мм. Шпилька резьба М24

Упаковка – воздушно-пузырчатая пленка.

Габаритные размеры упаковки: 600x600x850 мм. Вес – 11 кг. Объем – 0,31 м<sup>3</sup>.

#### Комплектность поставки

Верхняя часть (сиденье – спинка (с подлокотниками) с винтом) – 1 шт.

Нижняя часть (опора с кольцом для ног) – 1 шт.

Колесные опоры – 4 шт.

Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.

#### Инструкция по сборке

1. Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
2. Свинтить верхнюю часть кресла с нижней частью.
3. Установить колесные опоры в резьбовые отверстия нижней части кресла.



#### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### Уход за окрашенными поверхностями

1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Уход за кожзаменителем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щётки с мягким ворсом.
  2. Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
  3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожзаменитель.
  4. Время от времени кожзаменитель следует протирать влажной тканью или губкой.
  5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
  6. Кожзаменитель не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на него солнечных лучей.
  7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожзаменитель светлых тонов.
- ВНИМАНИЕ! Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61  
Тел.: +7 (812) 408-49-31  
<https://inmedix.ru/>  
E-mail: [info@inmedix.ru](mailto:info@inmedix.ru)