

# ПАСПОРТ

## Руководство по сборке и эксплуатации

### Кресло медицинское для лечебных учреждений КР10-2К

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-004-34960786-2019  
Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14497

#### Назначение и описание изделия

Кресло КР10-2К на винтовой опоре предназначено для сидения.

Область применения – медицинские учреждения, производственные помещения, учебные помещения, лаборатории, лечебно-профилактические учреждения, социальные учреждения, офисы и другие помещения.

Кресло с пятилучевым основанием диаметром 590 мм на колесных опорах диаметром 50 мм. Основание имеет регулируемое по высоте кольцо – опору для ног диаметром 360 мм.

Каркас изготовлен из стальной трубы. Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Высота сиденья регулируется от 620 до 740 мм.

Сиденье и спинка из полиуретана. Размер сиденья – 460x430 мм, размер спинки – 410x300 мм.

Кресло за дополнительную плату может комплектоваться подлокотниками из полиуретана. Размер подлокотника 220x90x30 мм. Высота от верха сиденья до верха подлокотника регулируется от 210 до 280 мм. Расстояние между подлокотниками 490 мм.

Упаковка – воздушно-пузырчатая пленка.

Габаритные размеры упаковки: 600x600x900 мм. Объем – 0,33 м<sup>3</sup>.  
Вес – 11 кг / 14 кг (с подлокотниками).

#### Комплектность поставки

Верхняя часть (сиденье – спинка с винтом) – 1 шт.

Нижняя часть (пятилучевое основание) – 1 шт.

Кольцо – опора для ног с тремя фиксаторами – 1 шт.

Колесные опоры – 5 шт.

*Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.*

#### Инструкция по сборке

1. Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
2. Установить кольцо-опору для ног на нижнюю часть. Выставить необходимую высоту и зафиксировать, закрутив три фиксатора.
3. Свинтить верхнюю часть кресла с нижней частью.
4. Установить колесные опоры в резьбовые отверстия нижней части кресла.



#### Обратите внимание!

Во избежание повреждения покрытия стойки каркаса на кольцо-опору для ног нельзя вставать.

Опорное кольцо является подставкой для ног во время сидения (чтобы избежать затекания ног).

Для регулировки кольца-опоры по высоте необходимо открутить все три фиксатора, выставить нужную высоту и зафиксировать кольцо, закрутив фиксаторы.

#### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### Уход за окрашенными поверхностями

1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Уход за полиуретаном

1. Изделия из полиуретана удобно и быстро очищаются, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами.
2. При загрязнении или потере лоска достаточно обработки поверхности салфеткой, смоченной в мыльном растворе комнатной температуры. Можно применять и обычный стиральный порошок для ручной стирки. Затем нужно протереть изделие бархатной тряпочкой, использовав при этом специальный силиконовый блеск.
3. Полиуретан устойчив к кратковременному воздействию температуры, поэтому избегайте длительного и чрезмерного нагрева или прямого попадания на него солнечных лучей.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61

Тел.: +7 (812) 408-49-31

<https://inmedix.ru/>, E-mail: [info@inmedix.ru](mailto:info@inmedix.ru)