

### **Обратите внимание!**

Во избежание повреждения стойки каркаса на кольцо-опору для ног нельзя вставлять.

Опорное кольцо является подставкой для ног во время сидения (чтобы избежать затекания ног).

Для регулировки кольца-опоры по высоте необходимо открутить фиксатор, выставить нужную высоту и зафиксировать кольцо, закрутив фиксатор.

#### **Правила по эксплуатации мебели**

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### **Уход за пластиковыми поверхностями**

1. Пластиковые поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### **Уход за кожзаменителем**

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щётки с мягким ворсом.
2. Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожзаменитель.
4. Время от времени кожзаменитель следует протирать влажной тканью или губкой.
5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
6. Кожзаменитель не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на него солнечных лучей.
7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожзаменитель светлых тонов.  
**ВНИМАНИЕ!** Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

#### **Условия гарантии**

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

## **ПАСПОРТ Руководство по сборке и эксплуатации**

### **Кресло КР24-В, КР24-В/П**

**Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01. В.28620/21 от 26.07.21**

#### **Назначение и описание изделия**

Кресло КР24-В и КР24-В/П на газ лифте предназначено для сидения.

Область применения – производственные помещения, учебные помещения, лаборатории, лечебно-профилактические учреждения, социальные учреждения, офисы и другие помещения.

Каркас изготовлен из нейлона со стекловолокном серого цвета, оснащён регулируемым по высоте кольцом – опорой для ног. Основание – пятилучье на колесных опорах 50 мм, диаметр основания – 600 мм.

Механизм подъема – газ лифт, высота сиденья регулируется от 570 мм до 820 мм. Высота кресла – от 930 мм до 1180 мм.

Сиденье и спинка обиты поролоном и обтянуты экокожей. Размер сиденья – 430x390 мм, размер спинки – 400x220 мм.

Кресло КР24-В/П комплектуется двумя подлокотниками из полиуретана. Высота от верха сиденья до верха подлокотника регулируется от 225 мм. Расстояние между подлокотниками 440 мм.

Вес изделия: КР24-В – 12 кг, КР24-В/П – 13 кг.

Упаковка кресла – картонная коробка. Вес – 13 кг. Объем – 0,11 м<sup>3</sup>.

Подлокотники упаковываются отдельно. Вес – 1 кг. Объем – 0,01 м<sup>3</sup>.

#### **Комплектация и инструкция по сборке**

Изделие поставляется в разобранном виде.













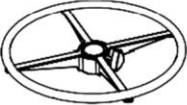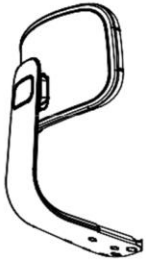





Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.

Перед сборкой снять защитный колпачок с газ лифта.


Установить колёсные опоры (ролики) в основание каркаса до характерного «щелчка».

*Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.*




Кольцо	Спинка	Сиденье	Опора	Ролик	Газлифт	Крепеж												
				 5 шт.		<table border="1"> <tr> <td>S1 X4 M6x20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S2 X2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S3 X1 M5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	S1 X4 M6x20		S2 X2		S3 X1 M5							
S1 X4 M6x20																		
S2 X2																		
S3 X1 M5																		
																		


1

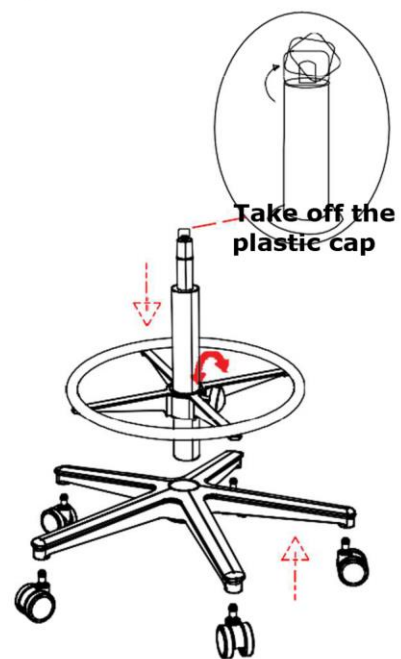

2

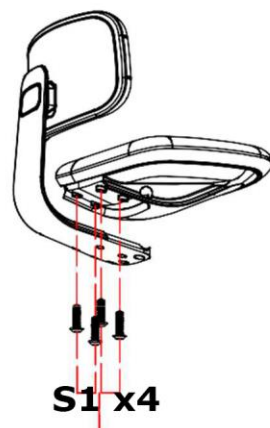

3

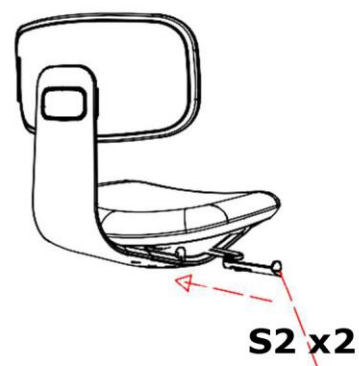

4

