

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за кожзаменителем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щётки с мягким ворсом.
 2. Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
 3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожзаменитель.
 4. Время от времени кожзаменитель следует протирать влажной тканью или губкой.
 5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
 6. Кожзаменитель не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на него солнечных лучей.
 7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожзаменитель светлых тонов.
- ВНИМАНИЕ! Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61

Тел.: [+7 \(812\) 408-49-31](tel:+7(812)408-49-31)

<https://inmedix.ru/>

E-mail: info@inmedix.ru

ПАСПОРТ

Руководство по сборке и эксплуатации

Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур К03

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-008-34960786-2023

Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/22913 от 14.06.2024

Код ОКПД2: 32.50.30.111. Вид медицинского изделия: 116920



Назначение и описание изделия

Кушетка медицинская для осмотра и проведения процедур (далее кушетка) предназначена для размещения на ней пациентов при проведении процедур, осмотра и обследования.

Кушетка применяется для оснащения кабинетов (в том числе косметологических и массажных) в медицинских и других лечебно-профилактических учреждениях.

Кушетка имеет бесступенчатую механическую регулировку угла наклона секции спины и ножной секции, а также раскладывается в горизонтальную плоскость.

Состоит из металлического каркаса; трех мягких секций (сиденье, секция спины и ножная секция); вращающихся и регулируемых по высоте (съёмных) подлокотников; откидной подушки на "липучке".

Каркас сварной, изготовлен из стальной профильной трубы 50x25 мм, 25x25 мм, рычаги механизмов регулировки угла наклона секций и рычаги подлокотников изготовлены из нержавеющей трубы круглого сечения.

Каркас имеет защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

В опорах установлены неподвижные глайдеры – заглушки*.

Сиденье, секции для спины и для ног изготовлены из ДСП толщиной 16 мм, обиты поролоном толщиной 50 мм (центральная часть) и 70 мм (края) и обтянуты экокожей. Секция для спины имеет заглушку из ДВП, обтянутую экокожей. Сиденье и секция для ног снизу обиты спанбондом.

Подлокотники изготовлены из фанеры толщиной 9 мм, обиты поролоном толщиной 50 мм, обтянуты экокожей.

Подушка для головы изготовлена из поролона 50 мм, обтянута экокожей.

Технические характеристики

Габаритные размеры изделия в положении сидя:

– длина 900 мм, ширина 990 мм (подлокот. тип 1) или 870 мм (тип 2), высота 1350 мм.

Габаритные размеры изделия в положении сидя на колёсах (с подставкой под ноги):

– длина 1120 мм, ширина 990 мм (подлокот. тип 1) или 870 мм (тип 2), высота 1430 мм.

– высота от пола до верха сиденья 590 мм (на колёсах* – 680 мм).

Габаритные размеры в положении лежа:

– длина места для лежания 1850 мм (1910 мм с подставкой под ноги).

Размер сиденья: ширина 600 мм, глубина 500 мм.

Размер секции для спины: высота 860 мм, ширина снизу (у сиденья) 600 мм, ширина сверху 400 мм. Угол поворота от 0° до 77°.

Размер секции для ног: высота 440 мм, ширина снизу 500 мм, ширина сверху (у сиденья) 600 мм. Угол поворота от 0° до 90°.

Размер мягкой части подлокотника: Тип 1 – длина 450 мм, ширина 190 мм, высота 55 мм. Тип 2 – длина 370 мм, ширина 130 мм, высота 55 мм.

Размер подушки для головы: длина 270 мм, ширина 150 мм.

* Может поставляться на прорезиненных колёсах, диаметром 125 мм, два колёса с прижимными тормозами (заказываются дополнительно). При поставке на колёсах возможна комплектация с регулируемой по вылету подставкой под ноги.

Допускаемая равномерно распределённая нагрузка: на ложе не более 160 кг, на секцию для спины – 50 кг, на секцию для ног – 50 кг, на подлокотники – 40 кг.

Вес изделия: 38 кг.

Поставляется в разобранном виде, в картонной коробке.

Габариты упаковки: 900x800x750 мм. Объем: 0,6 м³. Вес: 41 кг.

Комплектность поставки

1. Каркас в сборе *без спинки* – 1 шт.
2. Спинка (мягкая часть) – 1 шт.
3. Винты – 16 шт.
4. Подушка – 1 шт.

Сборка и эксплуатация

1. Установка спинки (см. рисунок):

- совместить отверстия на пластинах каркаса с резьбовыми отверстиями на спинке (в спинке вмонтированы забивные гайки);

- зафиксировать спинку винтами;

- прикрепить подушку к спинке.

2. Регулировка углов наклона ножной и спинной секций осуществляется при помощи механизмов клиновой упор.

Для изменения угла наклона вверх необходимо поднять секцию до нужного положения и отпустить (механизм самофиксируется).

Для изменения угла наклона вниз необходимо приподнять рычаг механизма вверх и, придерживая секцию (мягкий элемент), опустить ее вниз на нужный уровень (механизм самофиксируется).

3. Для регулировки высоты и вращения подлокотников необходимо ослабить фиксаторы, установить подлокотники в нужном положении и затянуть фиксаторы.

