

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия.

ПАСПОРТ Руководство по сборке и эксплуатации

Ширма Ш03 с ПВХ разборная

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-009-34960786-2023
Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/22200 от 13.03.2024

Назначение и описание изделия



Ширма с ПВХ предназначена для разграничения площади палат и рабочего помещения на отдельные отсеки, образуя для них рабочие места и отделяя служебные площади от приемной для пациентов.

Ширма применяется для оснащения кабинетов (в том числе косметологических и массажных) в медицинских, лечебных и других лечебно-профилактических учреждениях.

Каркас стальной разборный. Стойки рамы изготовлены из электросварной трубы диаметром 20 мм, перемычки – из электросварной трубы диаметром 16 мм, опора – из профильной трубы 30x15 мм.

Все детали каркаса имеют защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

В открытые срезы труб установлены пластиковые заглушки.

Ширма устанавливается на ролики диаметром 50 мм или на заглушки.

Полотнище из ткани ПВХ 0,4 мм размером 640x1400 мм. Ткань легко снимается для обработки.

Габаритные размеры ширмы: ширина 685 мм, высота 1630 мм, длина опоры 405 мм.

Ширма поставляется в разобранном виде в специальном чехле.

Размер упаковки: 170x100x1700 мм. Вес 3,5 кг.

Ширмы данной модели стыкуются между собой в любом количестве при помощи пластиковых соединителей, которые входят в комплект каждой ширмы.

Комплектность поставки



1. Стойка (под ролик или заглушку) – 1 шт.
2. Стойка с пластиной – 1 шт.
3. Перемычка – 2 шт.
4. Опора – 1 шт.
5. Полотно – 1 шт.
6. Ролик (или заглушка) – 3 шт.
7. Винт М6х20 – 6 шт.
8. Соединитель пластиковый – 2 шт.



Инструкция по сборке изделия

1. Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
2. Продеть стойку с пластиной через центральное отверстие опоры.
3. Прикрепить опору к пластине стойки при помощи двух винтов.
4. Продеть перемычки через полотно.
5. Соединить стяжки с отверстиями на стойках и зафиксировать при помощи четырех винтов.
6. Установить ролики (или заглушки) в резьбовые отверстия опоры и стойки.

Сборка нескольких из ширм

1. Сборка нескольких ширм производится при помощи пластиковых соединителей.
2. Зафиксировать пластиковые соединители сверху и снизу на стойке с опорой одной ширмы, затем зафиксировать в них стоку с роликом (или заглушкой) другой ширмы.
3. Таким образом можно соединить неограниченное количество ширм.

