

# ПАСПОРТ

## Руководство по сборке и эксплуатации

### Ширма с пластиком

#### Варианты исполнения:

Модель Ш02/3 – трёхсекционная ширма с пластиком (2080x410x1650 мм, вес 19 кг)

Модель Ш02/2 – двухсекционная ширма с пластиком (1390x410x1650 мм, вес 13 кг)

Модель Ш02/1 – односекционная ширма с пластиком (690x410x1650 мм, вес 7 кг)

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-009-34960786-2023

Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/22200 от 13.03.2024

#### Назначение и описание изделия

Ширмы с пластиком предназначены для разграничения площади палат и рабочего помещения на отдельные отсеки, образуя для них рабочие места и отделяя служебные площади от приемной для пациентов.

Ширмы применяются для оснащения кабинетов (в том числе косметологических и массажных) в медицинских, лечебных и других лечебно-профилактических учреждениях.

Каркас стальной. Рамы сварные, изготовлены из профильной трубы 20x20 мм (толщина стенки 1,5 мм). Опоры основной рамы съемные.

Все детали каркаса имеют защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

В открытые срезы труб установлены пластиковые заглушки.

В двухсекционной (Ш02/2) и трехсекционной (Ш02/3) ширмах рамы соединены между собой при помощи рояльных петель и имеют угол открывания 180°.

Трёхсекционная ширма (Ш02/3) складывается "гармошкой".

Ширма устанавливается на ролики диаметром 50 мм или на заглушки.

Полотнище из пластика толщиной 1,5 мм белого цвета, легко моется.



#### Комплектность поставки

Наименование		Количество, шт.		
		Ш02/3	Ш02/2	Ш02/1
Основная рама с пластиком	<i>Рамы соединены между собой</i>	1	1	1
Боковая рама с пластиком		2	1	—
Опора		2	2	2
Ролик (или заглушка)		6	5	4
Болт М6x16 DIN912		2	2	2
Г-образный ключ		1	1	1

#### Инструкция по сборке изделия

1. Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
2. Установить опору пластинами в вертикальный профиль основной рамы.
3. Совместить отверстия на пластине с гайкой и на профиле рамы.
4. При помощи болта закрепить опору.
5. Таким же образом установить вторую опору в вертикальный профиль рамы и закрепить при помощи болта.
6. Вкрутить ролики (или заглушки) в резьбовые отверстия на опорах.

#### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61

Тел.: [+7 \(812\) 408-49-31](tel:+7(812)408-49-31)

<https://inmedix.ru/>

E-mail: [info@inmedix.ru](mailto:info@inmedix.ru)