

ПАСПОРТ

Руководство по сборке и эксплуатации

Ширма с ПВХ

Варианты исполнения:

Модель Ш01/3 – трёхсекционная ширма с ПВХ (2080x410x1650 мм, вес 15,5 кг)

Модель Ш01/2 – двухсекционная ширма с ПВХ (1390x410x1650 мм, вес 11 кг)

Модель Ш01/1 – односекционная ширма с ПВХ (690x410x1650 мм, вес 5,8 кг)

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-009-34960786-2023

Регистрационное удостоверение № РЗН 2024/22200 от 13.03.2024

Назначение и описание изделия

Ширмы с ПВХ предназначены для разграничения площади палат и рабочего помещения на отдельные отсеки, образуя для них рабочие места и отделяя служебные площади от приемной для пациентов.

Ширмы применяются для оснащения кабинетов (в том числе косметологических и массажных) в медицинских, лечебных и других лечебно-профилактических учреждениях.

Каркас стальной. Рамы сварные, изготовлены из профильной трубы 20x20 мм (толщина стенки 1,5 мм). Опоры основной рамы съёмные.

Все детали каркаса имеют защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

В открытые срезы труб установлены пластиковые заглушки.

В двухсекционной (Ш01/2) и трехсекционной (Ш01/3) ширмах рамы соединены между собой при помощи рояльных петель и имеют угол открывания 180°.

Трёхсекционная ширма (Ш01/3) складывается "гармошкой".

Ширма устанавливается на ролики диаметром 50 мм или заглушки.

Полотнище из ПВХ 0,4 мм легко снимается для обработки.



Комплектность поставки

Наименование		Количество, шт.		
		Ш01/3	Ш01/2	Ш01/1
Основная рама с ПВХ	Рамы соединены между собой	1	1	1
Боковая рама с ПВХ		2	1	—
Опора		2	2	2
Ролик (или заглушка)		6	5	4
Болт М6x16 DIN912		2	2	2
Г-образный ключ		1	1	1

Инструкция по сборке изделия

1. Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
2. Установить опору пластинами в вертикальный профиль основной рамы.
3. Совместить отверстия на пластине с гайкой и на профиле рамы.
4. При помощи болта закрепить опору.
5. Таким же образом установить вторую опору в вертикальный профиль рамы и закрепить при помощи болта.
6. Вкрутить ролики (или заглушки) в резьбовые отверстия на опорах.

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61

Тел.: +7 (812) 408-49-31

<https://inmedix.ru/>

E-mail: info@inmedix.ru