

ПАСПОРТ

Руководство по сборке и эксплуатации

Штатив медицинский для внутривенных вливаний тип П01 на 2 держателя

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.13-004-06429566-2018
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7504 от 26.03.2020

Назначение и описание изделия

Штатив предназначен для размещения емкостей с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами при проведении лечебных процедур.

Область применения: оснащение медицинских, лечебных и лечебно-профилактических учреждений.

Опора и стойки штатива изготовлены из стальных труб круглого и квадратного сечения.

Держатели емкостей изготовлены из стальной проволоки.

Металлические детали штатива имеют защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Высота изделия изменяется от 1300 до 2300 мм.

Габаритный размер держателей 310 мм.

Разлет опор 500x500 мм.

Колесные опоры диаметром 50 мм.


Вес изделия – 2,8 кг.

Комплектация

1. Стойка № 1 с переходником (болт-барашек) и основанием на колесах – 1 шт.
2. Стойка № 2 с двумя держателями – 1 шт.

Инструкция по сборке

1. Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
2. При необходимости, в стойку № 1 вставить стойку № 2 через переходник.
3. Установить стойку № 2 на нужную высоту и зажать болтом-барашком.

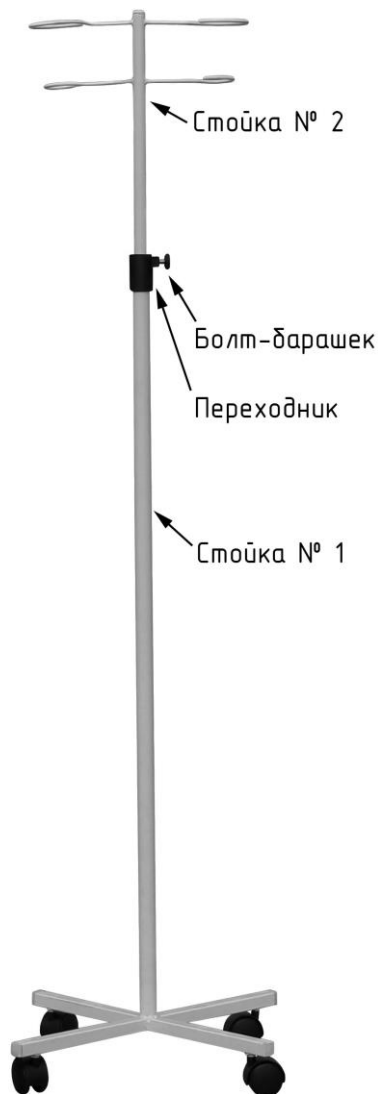

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия лучей солнца, т.к. это вредит внешнему виду изделия. Может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии более 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на водной основе, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия на крепежные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции, не распространяется.