

ПАСПОРТ

Руководство по сборке и эксплуатации

Штатив медицинский для внутривенных вливаний тип П04 на 2 держателя

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.13-004-06429566-2018
Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7504 от 26.03.2020

Назначение и описание изделия

Штатив предназначен для размещения емкостей с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами при проведении лечебных процедур.

Область применения: оснащение медицинских, лечебных и лечебно-профилактических учреждений.

Опора и стойки штатива изготовлены из стальных труб круглого сечения.

Держатели емкостей изготовлены из стальной проволоки.

Металлические детали штатива имеют защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской.


Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Высота изменяется от 1250 до 1950 мм.

Разлет опор 600х600 мм.

Вес изделия – 2 кг.

Поставляется в разобранном виде.

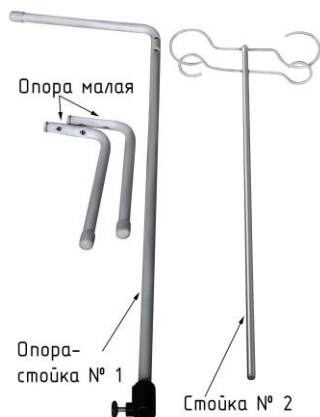

Комплектация

1. Опора-стойка № 1 с переходником (болт-барашек) – 1 шт.
2. Стойка № 2 выдвижная с двумя держателями – 1 шт.
3. Опора малая – 2 шт.
4. Винт с потайной головкой М6х60 – 2 шт.
5. Гайка колпачковая М6 – 2 шт.



Инструкция по сборке

1. Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
2. Соединить опору-стойку № 1 с двумя опорами малыми при помощи двух винтов М6х60 и двух гаек М6.
3. Вставить выдвижную стойку № 2 в опору-стойку № 1 через переходник.
4. Установить стойку № 2 на нужную высоту и зажать болтом-барашком.

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия лучей солнца, т.к. это вредит внешнему виду изделия. Может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии более 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на водной основе, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия на крепежные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции, не распространяется.