

ПАСПОРТ

Руководство по сборке и эксплуатации

Стойка для забора крови СП01

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-005-06429566-2018
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8073

Назначение и описание изделия

Стойка СП01 предназначена для удобства забора крови или проведения внутривенных манипуляций.

Область применения: оснащение медицинских, лечебных и лечебно-профилактических учреждений.

Каркас стойки изготовлен из стальных труб круглого и квадратного сечения, имеет защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Стойка установлена регулируемые опоры, которые компенсируют неровность пола.

Мягкий элемент изготовлен из ДСП, поролона и обит экокожей. Толщина мягкого элемента 50 мм, длина 300 мм, ширина 150 мм.

Высота стойки изменяется от 700 до 1000 мм.

Разлет опор 510x510 мм.

Вес изделия – 3 кг.

Комплектность поставки

1. Нижняя стойка – опора с переходником (болт-барашек) и основанием на четырех регулируемых опорах – 1 шт.
2. Верхняя стойка с мягким элементом – 1 шт.

Инструкция по сборке

1. Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
2. При необходимости, в нижнюю стойку вставить верхнюю стойку через переходник.
3. Установить верхнюю стойку на необходимую высоту и затянуть болтом-барашком.



Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия лучей солнца, т.к. это вредит внешнему виду изделия. Может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии более 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на водной основе, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за кожнозаменилем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щётки с мягким ворсом.
 2. Кожзамениль не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
 3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожнозамениль.
 4. Время от времени кожнозамениль следует протирать влажной тканью или губкой.
 5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
 6. Кожзамениль не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на него солнечных лучей.
 7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожу светлых тонов.
- ВНИМАНИЕ! Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия на крепежные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции, не распространяется.