

ПАСПОРТ

Руководство по сборке и эксплуатации

Столик складной для забора крови СЛ1

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-005-06429566-2018
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8073

Назначение и описание изделия

Столик складной СЛ1 предназначен для удобства забора крови, проведения внутривенных манипуляций и прочих процедур.

Область применения: оснащение медицинских, лечебных и лечебно-профилактических учреждений.

Каркас столика изготовлен из стальной электросварной трубы диаметром 20 мм, имеет защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Столешница изготовлена из ДСП, толщиной 16 мм, поролон толщиной 50 мм и обита экокожей. Снизу обита спанбондом.

Размер столешницы 530x380 мм.

Высота столика 750 мм.

Габариты в сложенном виде: 550x130x1100 мм.

Вес изделия – 5 кг.

Поставляется в собранном виде.

Инструкция по эксплуатации

1. Аккуратно распаковать изделие.
2. Разложить ножки стола, вставив верх свободной опоры в фиксатор на столешнице.
3. Установить столик на ровную поверхность.



Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия лучей солнца, т.к. это вредит внешнему виду изделия. Может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии более 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на водной основе, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за кожзаменителем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щётки с мягким ворсом.
 2. Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
 3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожзаменитель.
 4. Время от времени кожзаменитель следует протирать влажной тканью или губкой.
 5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
 6. Кожзаменитель не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на него солнечных лучей.
 7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожу светлых тонов.
- ВНИМАНИЕ! Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия на крепежные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции, не распространяется.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61
Тел.: +7 (812) 408-49-31
<https://inmedix.ru/>
E-mail: info@inmedix.ru