

ПАСПОРТ
Руководство по сборке и эксплуатации
Стул медицинский для лечебных учреждений СТ2
со столиком (пюпитром)

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01. В.28620/21 от 26.07.21

Назначение и описание изделия

Стул СТ2 с откидным столиком (пюпитром) предназначен для сидения.

Область применения – оснащение кабинетов, зон ожидания и отдыха медицинских учреждений, производственных помещений, учебных помещений, лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, социальных учреждений, офисов и других помещений.

Каркас стула сварной, изготовлен из стальной профильной трубы 20x20 мм, толщина стенки 1,5 мм.

Каркас имеет защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Сиденье и спинка обиты поролоном и обтянуты экокожей. Дно сиденья обито спанбондом. Спинка имеет заглушку, обтянутую экокожей.

Размер сиденья: 390x390 мм, толщина 50 мм. Высота сиденья: 470 мм.

Размер спинки: 360x360 мм.

Конструкция столика позволяет поднимать столешницу вертикально и опускать горизонтально.

Каркас столика стальной с защитно-декоративным покрытием.

Столешница изготовлена из МДФ. Размер 590x360 мм, толщина 16 мм.

Габаритные размеры изделия: ширина 535 мм, глубина 780 мм, высота 880 мм.

Вес изделия: 12 кг.

Стулья без установленных столиков стопируются по 10 штук.



Оптимальная упаковка по 5 шт. в воздушно-пузырчатой пленке.
Габаритные размеры: 450x600x1250 мм. Объем: 0,34 м³. Вес: 36 кг + Столик (5 шт.), объем 0,2 м³, вес 26 кг.

Упаковка 1 шт. – воздушно-пузырчатая пленка.
Габаритные размеры: 450x600x900 мм. Объем: 0,25 м³. Вес: 7,2 кг + Столик (1 шт.), объем 0,05 м³, вес 5,2 кг.

Комплектность поставки

Стул – 1 шт.
Каркас столика – 1 шт.
Столешница с установленными футорками М10 – 1 шт.
Винт М6x30 – 4 шт.

Инструкция по сборке

1. Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
2. Установить каркас столика в направляющие под сиденье стула.
3. Установить столешницу на каркас столика. Совместить отверстия на каркасе с резьбовыми футорками на столешнице. Зафиксировать столешницу винтами М6x30.

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

4. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
5. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
6. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за кожзаменителем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щётки с мягким ворсом.
 2. Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
 3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожзаменитель.
 4. Время от времени кожзаменитель следует протирать влажной тканью или губкой.
 5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
 6. Кожзаменитель не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на него солнечных лучей.
 7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожзаменитель светлых тонов.
- ВНИМАНИЕ! Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

Уход за МДФ

1. При уходе за поверхностью из МДФ рекомендуется применять качественные, специально предназначенные чистящие и полирующие средства.
2. Пыль с изделий удалять при помощи сухой, чистой, мягкой ткани (фланель, плюш). В качестве дополнительного ухода допускается обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами (на мыльной основе).

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.