

ПАСПОРТ

Руководство по сборке и эксплуатации

Стул медицинский для лечебных учреждений СТЗ

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-005-06429566-2018
Регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8073

Назначение и описание изделия

Стул СТЗ с подлокотниками предназначен для сидения. Область применения – оснащение кабинетов, зон ожидания и отдыха медицинских учреждений, производственных помещений, учебных помещений, лабораторий, лечебно-профилактических учреждений, социальных учреждений, офисов и других помещений.

Каркас сварной, изготовлен из стальной профильной трубы 20x20 мм, толщина стенки 1,5 мм.

Каркас имеет защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Сиденье и спинка обиты поролоном и обтянуты экокожей. Дно сиденья обито спанбондом. Спинка имеет заглушку, обтянутую экокожей. Подлокотники пластиковые, обтянуты экокожей.

Размер сиденья: 390x390 мм, толщина 50 мм.

Размер спинки: 360x360 мм.

Размер подлокотника: 45x260 мм.

Высота сиденья от пола до верха сиденья: 470 мм.

Расстояние между подлокотниками: 475 мм.

Расстояние от пола до верха подлокотников: 645 мм.

Расстояние от верха сиденья до верха подлокотников: 200 мм.

Габаритные размеры изделия: глубина 520 мм (внизу) и 560 мм (вверху), ширина 560 мм, высота 870 мм.

Вес изделия – 10 кг.

Изделие стопируется.

Изделие поставляется в собранном виде.

Оптимальная упаковка по 5 шт. в воздушно-пузырчатой пленке.

Габаритные размеры: 650x600x1250 мм. Объем: 0,5 м³. Вес: 52 кг.

Упаковка 1 шт. – воздушно-пузырчатая пленка.

Габаритные размеры: 650x600x900 мм. Объем: 0,35 м³. Вес: 10,4 кг.



Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными поверхностями

1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за кожзаменителем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щётки с мягким ворсом.
 2. Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
 3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожзаменитель.
 4. Время от времени кожзаменитель следует протирать влажной тканью или губкой.
 5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
 6. Кожзаменитель не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на него солнечных лучей.
 7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожзаменитель светлых тонов.
- ВНИМАНИЕ! Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев
Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.
Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.