

## ПАСПОРТ

### Руководство по сборке и эксплуатации

#### Табурет медицинский для лечебных учреждений Т01

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-004-34960786-2019

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14497

#### Назначение и описание изделия

Табурет Т01 на винтовой опоре предназначен для сидения.

Область применения – различные учреждения, производственные помещения, учебные помещения, социальные учреждения, дома, офисы и другие помещения.

Табурет оснащен дополнительным кольцом жесткости под сиденьем. Четырехлучевое основание диаметром 530 мм (с колесными опорами 560 мм) на колесных опорах диаметром 50 мм. Основание имеет специальное кольцо – опору для ног диаметром 360 мм.

Каркас изготовлен из стальной трубы. Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Высота сиденья регулируется от 440 до 560 мм.

Сиденье изготовлено из МДФ. Диаметр сиденья 380 мм, толщина 16 мм.

Упаковка – воздушно-пузырчатая пленка.

Габаритные размеры упаковки: 450x550x550 мм. Объем – 0,14 м<sup>3</sup>. Вес – 7 кг.



#### Комплектность поставки

Верхняя часть (сиденье с винтом) – 1 шт.

Нижняя часть (опора с кольцом для ног) – 1 шт.

Колесные опоры – 4 шт.

*Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.*

#### Инструкция по сборке

1. Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
2. Свинтить верхнюю часть табурета с нижней частью.
3. Установить колесные опоры в резьбовые отверстия нижней части.

#### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### Уход за окрашенными поверхностями

1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Уход за МДФ

1. При уходе за поверхностью из МДФ рекомендуется применять качественные, специально предназначенные чистящие и полирующие средства.
2. Пыль с изделий удалять при помощи сухой, чистой, мягкой ткани (фланель, плюш). В качестве дополнительного ухода допускается обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами (на мыльной основе).

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61  
Тел.: [+7 \(812\) 408-49-31](tel:+7(812)408-49-31)  
<https://inmedix.ru/>  
E-mail: [info@inmedix.ru](mailto:info@inmedix.ru)