

## ПАСПОРТ

### Руководство по сборке и эксплуатации

#### Табурет медицинский для лечебных учреждений Т03

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-004-34960786-2019  
Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14497

#### Назначение и описание изделия

Табурет Т03 на винтовой опоре предназначен для сидения.

Область применения – медицинские учреждения, производственные помещения, учебные помещения, лаборатории, лечебно-профилактические учреждения, социальные учреждения, офисы и другие помещения.

Табурет с пятилучевым основанием диаметром 590 мм на опорах-заглушках. Основание имеет регулируемое по высоте усиленное кольцо – опору для ног диаметром 360 мм. Табурет оснащен дополнительным кольцом жесткости под сиденьем.

Каркас изготовлен из стальной трубы. Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Высота сиденья регулируется от 510 до 650 мм.

Сиденье обито поролоном и обтянуто экокожей. Диаметр сиденья 375 мм.

Упаковка – воздушно-пузырчатая пленка.

Габаритные размеры упаковки: 550х600х600 мм. Объем – 0,2 м<sup>3</sup>. Вес – 8 кг.



#### Комплектность поставки

Верхняя часть (сиденье с винтом) – 1 шт.

Нижняя часть (пятилучевое основание) – 1 шт.

Кольцо – опора для ног с тремя фиксаторами – 1 шт.

#### Инструкция по сборке

1. Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
2. Установить кольцо-опору для ног на нижнюю часть. Выставить необходимую высоту и зафиксировать, закрутив три фиксатора.
3. Свинтить верхнюю часть табурета с нижней частью.

#### Обратите внимание!

*Во избежание повреждения покрытия стойки каркаса на кольцо-опору для ног нельзя вставлять.*

*Опорное кольцо является подставкой для ног во время сидения (чтобы избежать затекания ног).*

*Для регулировки кольца-опоры по высоте необходимо открутить все три фиксатора, выставить нужную высоту и зафиксировать кольцо, закрутив фиксаторы.*

#### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### Уход за окрашенными поверхностями

1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Уход за кожзаменителем

1. Рекомендуется регулярное удаление пыли с помощью пылесоса или щётки с мягким ворсом.
  2. Кожзаменитель не нуждается в обработке защитными средствами. Изготовитель за Вас уже это сделал.
  3. Обычные очистительные химические средства могут повредить кожзаменитель.
  4. Время от времени кожзаменитель следует протирать влажной тканью или губкой.
  5. Пятна следует удалять сразу же с помощью мягкой ткани или губки, смоченной в мыльной воде. Не надавливайте и не трите.
  6. Кожзаменитель не любит чрезмерный нагрев, сухость или прямое попадание на него солнечных лучей.
  7. Красящиеся текстильные материалы могут повлиять на кожзаменитель светлых тонов.
- ВНИМАНИЕ!** Если у Вас не получается очистить собственными силами обивочный материал Вашей мебели, обратитесь в специализированные фирмы по химической чистке.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61  
Тел.: +7 (812) 408-49-31  
<https://inmedix.ru/>  
E-mail: [info@inmedix.ru](mailto:info@inmedix.ru)