

ПАСПОРТ

Руководство по сборке и эксплуатации

Табурет медицинский для лечебных учреждений Т06

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-004-34960786-2019

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14497

Назначение и описание изделия

Табурет Т06 на газ лифте предназначен для сидения.

Область применения – медицинские учреждения, производственные помещения, учебные помещения, лаборатории, лечебно-профилактические учреждения, социальные учреждения, офисы и другие помещения.

Каркас – стальной с гальваническим покрытием, оснащён кольцом – опорой для ног диаметром 320 мм. Основание – пятилучье на колесных опорах 50 мм, диаметр основания – 430 мм. Механизм подъема – газ лифт, высота сиденья регулируется от 450 мм до 610 мм.

Сиденье из полиуретана – 4 варианта исполнения:

■ **прямоугольное** с отверстием для руки (ширина 370 мм, глубина 350 мм, толщина 30 мм); ■ **прямоугольное** со спинкой (ширина 340 мм, глубина 360 мм, толщина от 40 до 60 мм); ■ **круглое** с рисунком (диаметр 340 мм, толщина 45 мм); ■ **круглое** с удобным углублением (диаметр 360 мм, толщина 40 мм).

Вес изделия – 5 кг.

Упаковка – 2 места. Габаритные размеры упаковки:

- каркас – 370x110x370 мм, вес – 3,5 кг, объем – 0,016 м³,

- сиденье – 370x360x80 мм, вес – 1,5 кг, объем – 0,01 м³.









Комплектация и инструкция по сборке


Изделие поставляется в разобранном виде.

Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.

Перед сборкой снять защитный колпачок с газ лифта.

Установить колёсные опоры (ролики) в основание каркаса до характерного «щелчка».

A – 1 шт. 	E – 1 шт. 
B – 1 шт. 	F – 4 шт. 
C – 5 шт. 	G – 1 шт. 
D – 1 шт. 	H – 1 шт. 

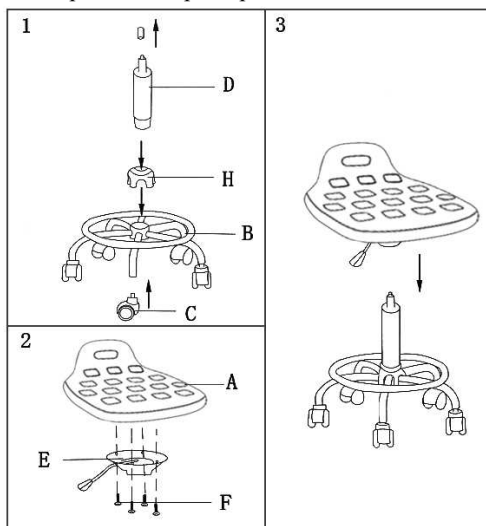

Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

Уход за окрашенными и хромированными поверхностями

1. Хромированные и окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

Уход за полиуретаном

1. Изделия из полиуретана удобно и быстро очищаются, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами.
2. При загрязнении или потере лоска достаточно обработки поверхности салфеткой, смоченной в мыльном растворе комнатной температуры. Можно применять и обычный стиральный порошок для ручной стирки. Затем нужно протереть изделие бархатной тряпочкой, использовав при этом специальный силиконовый блеск.
3. Полиуретан устойчив к кратковременному воздействию температуры, поэтому избегайте длительного и чрезмерного нагрева или прямого попадания на него солнечных лучей.

Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61

Тел.: +7 (812) 408-49-31

<https://inmedix.ru/>

E-mail: info@inmedix.ru