

## ПАСПОРТ

### Руководство по сборке и эксплуатации

#### Табурет медицинский для лечебных учреждений Т09/К

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-004-34960786-2019

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14497

#### Назначение и описание изделия

Табурет Т09/К на винтовой опоре предназначен для сидения.

Область применения – медицинские учреждения, производственные помещения, учебные помещения, лаборатории, лечебно-профилактические учреждения, социальные учреждения, офисы и другие помещения.

Табурет с пятилучевым основанием диаметром 590 мм на колесных опорах диаметром 50 мм. Основание имеет регулируемое по высоте кольцо – опору для ног диаметром 360 мм.

Каркас изготовлен из стальной трубы. Металлические детали имеют защитно-декоративное покрытие полимерной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Все торцы труб закрыты пластиковыми заглушками.

Высота сиденья регулируется от 570 до 690 мм.

Сиденье из полиуретана – 4 варианта исполнения:

▪ **прямоугольное** с отверстием для руки (ширина 370 мм, глубина 350 мм, толщина 30 мм); ▪ **прямоугольное** со спинкой (ширина 340 мм, глубина 360 мм, толщина от 40 до 60 мм); ▪ **круглое** с рисунком (диаметр 340 мм, толщина 45 мм); ▪ **круглое** с удобным углублением (диаметр 360 мм, толщина 40 мм).

Упаковка – воздушно-пузырчатая пленка.

Габаритные размеры упаковки: 550x600x600 мм.

Объем – 0,2 м<sup>3</sup>. Вес – 8 кг.



#### Комплектность поставки

Верхняя часть (сиденье с винтом) – 1 шт.

Нижняя часть (пятилучевое основание) – 1 шт.

Кольцо – опора для ног с тремя фиксаторами – 1 шт.

Колесные опоры – 5 шт.

Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.

#### Инструкция по сборке

1. Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.
2. Установить кольцо-опору для ног на нижнюю часть. Выставить необходимую высоту и зафиксировать, закрутив три фиксатора.
3. Свинтить верхнюю часть табурета с нижней частью.
4. Установить колесные опоры в резьбовые отверстия нижней части.

#### Обратите внимание!

Во избежание повреждения покрытия стойки каркаса на кольцо-опору для ног нельзя вставлять. Опорное кольцо является подставкой для ног во время сидения (чтобы избежать затекания ног).

Для регулировки кольца-опоры по высоте необходимо открутить все три фиксатора, выставить нужную высоту и зафиксировать кольцо, закрутив фиксаторы.

#### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### Уход за окрашенными поверхностями

1. Окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Уход за полиуретаном

1. Изделия из полиуретана удобно и быстро очищаются, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами.
2. При загрязнении или потере лоска достаточно обработки поверхности салфеткой, смоченной в мыльном растворе комнатной температуры. Можно применять и обычный стиральный порошок для ручной стирки. Затем нужно протереть изделие бархатной тряпочкой, использовав при этом специальный силиконовый блеск.
3. Полиуретан устойчив к кратковременному воздействию температуры, поэтому избегайте длительного и чрезмерного нагрева или прямого попадания на него солнечных лучей.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61

Тел.: +7 (812) 408-49-31

<https://inmedix.ru/>

E-mail: [info@inmedix.ru](mailto:info@inmedix.ru)