

# ПАСПОРТ

## Руководство по сборке и эксплуатации

### Табурет медицинский для лечебных учреждений Т10

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-004-34960786-2019  
Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14497

#### Назначение и описание изделия

Табурет Т10 на газ лифте предназначен для сидения.

Область применения – медицинские учреждения, производственные помещения, учебные помещения, лаборатории, лечебно-профилактические учреждения, социальные учреждения, офисы и другие помещения.

Каркас пластиковый черного цвета. Основание – пятилучье на колесных опорах 50 мм, диаметр основания – 600 мм. Механизм подъема – газ лифт, высота сиденья регулируется от 420 мм до 540 мм.

Сиденье из полиуретана – 4 варианта исполнения:

■ **прямоугольное** с отверстием для руки (ширина 370 мм, глубина 350 мм, толщина 30 мм); ■ **прямоугольное** со спинкой (ширина 340 мм, глубина 360 мм, толщина от 40 до 60 мм); ■ **круглое** с рисунком (диаметр 340 мм, толщина 45 мм); ■ **круглое** с углублением (диаметр 360 мм, толщина 40 мм).

Вес изделия – 6 кг.

Упаковка картонная коробка. Габаритные размеры упаковки: 570x580x130 мм, объем – 0,05 м<sup>3</sup>, вес – 7 кг.

#### Комплектация и инструкция по сборке

Изделие поставляется в разобранном виде.

Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.

Перед сборкой снять защитный колпачок с газ лифта.

Установить колёсные опоры (ролики) в основание каркаса до характерного «щелчка».

Сиденье	Механизм	Основание	Колесо	Газ лифт
<b>Крепёжные изделия</b>				
S1 x4 M6x20		  		
S2 x4 M6x16x1,2				
S3 x4 5 мм				
S4 x1 M5				



#### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### Уход за пластиковыми поверхностями

1. Пластиковые поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Уход за полиуретаном

1. Изделия из полиуретана удобно и быстро очищаются, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами.
2. При загрязнении или потере лоска достаточно обработки поверхности салфеткой, смоченной в мыльном растворе комнатной температуры. Можно применять и обычный стиральный порошок для ручной стирки. Затем нужно протереть изделие бархатной тряпочкой, использовав при этом специальный силиконовый блеск.
3. Полиуретан устойчив к кратковременному воздействию температуры, поэтому избегайте длительного и чрезмерного нагрева или прямого попадания на него солнечных лучей.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.

ООО «Инмедикс» 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 38, к. 2, лит. А, офис 61  
Тел.: +7 (812) 408-49-31  
<https://inmedix.ru/>  
E-mail: [info@inmedix.ru](mailto:info@inmedix.ru)